



SafeMatrix™




1, 2, 3 – klaar!

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...




3 Stappen naar een perfecte vulling


- 1** Matrix band voorbereiden:
Druk het pinnetje volledig in de houder. Deze kant aan de gingiva zijde plaatsen. De band past zich conisch aan de anatomie van de tand aan.

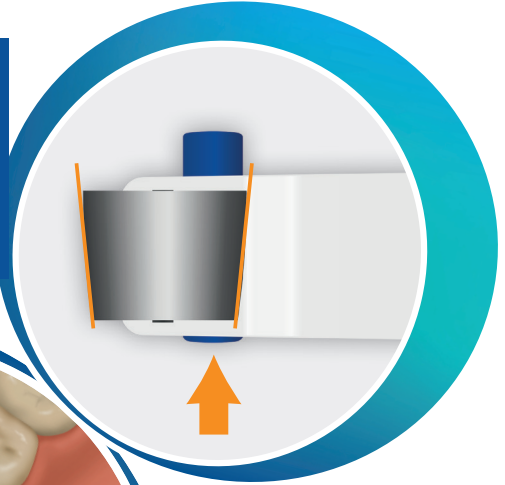

- 2** Plaats de matrix band om de tand en leid deze voorzichtig in de optimale positie. Draai de gekleurde knop met de klok mee om de matrix vast te draaien. De matrix band kan indien nodig gepolijst worden. Gebruik indien nodig wiggen.

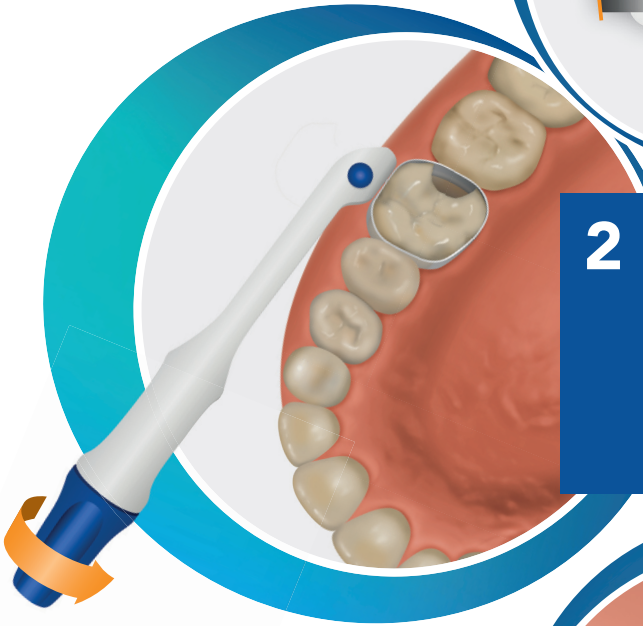

- 3** Maak na voltooiing van de restauratie het bandje los door de knop tegen de klok in te draaien en de SafeMatrix op te tillen.

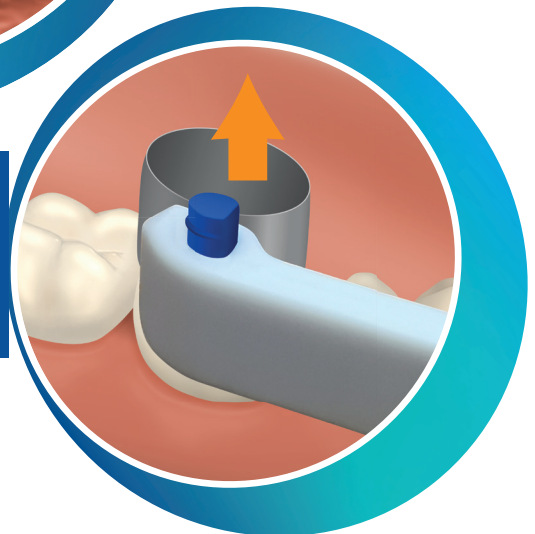

SafeMatrix – de voordelen

Universeel toepasbaar

SafeMatrix is geschikt voor alle MO/OD en MOD caviteiten, maar ook voor bulkvullingen en als preparatiebescherming.

Combineerbaar

Kan met alle restauratiematerialen gebruikt worden alsook met wiggen en kofferdammen combineerbaar.

Perfekte pasvorm

Dankzij het spanmechanisme en de conische aanpassing omsluit SafeMatrix de tand perfect en maakt het perfecte interproximale contactpunten mogelijk.

Gebruiksvriendelijk ontwerp

De smalle matrix houder en afgeronde randen garanderen een veilige toegang tijdens de behandeling en een aangenaam gevoel voor de patiënt.

Hygiënisch

Elke matrixband is individueel verpakt. Als product voor eenmalig gebruik hoeft het niet te worden gereinigd noch gesteriliseerd.

Tijd- en kostenbesparend


De tijdrovende montage van bandjes in hun houder is niet langer nodig.

Zacht


Problemen van metalen houders, zoals bv. verwondingen aan gingiva en wang als gevolg van scherpe randen, of gecorrodeerde oppervlakken behoren tot het verleden.

De matrix met "Contour"

SafeMatrix Contour is voorgevormd en past zich perfect aan de anatomie van de tand aan.

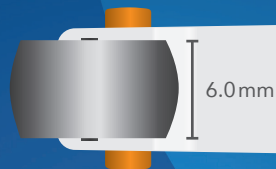

SafeMatrix Contour
Wide 6.0 mm

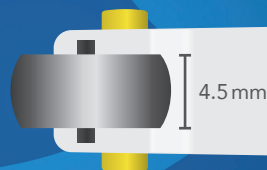

SafeMatrix Contour
Narrow 4.5 mm

Bestelling

① +49 [0] 21 71 - 70 66 70
@ info@loser.eu



Voorge-
vormd

SafeMatrix Contour Wide

- Bandbreedte: 6,0 mm
- gebogen
- Inhoud: 50 St. (individueel verpakt)

Art.-Nr.: 30055

Prijs: € 56,90



Voorge-
vormd

SafeMatrix Contour Narrow

- Bandbreedte: 4,5 mm
- gebogen
- Inhoud: 50 St. (individueel verpakt)

Art.-Nr.: 30060

Prijs: € 56,90



recht

SafeMatrix Wide

- Bandbreedte: 6,0 mm
- Inhoud: 50 St. (individueel verpakt)

Art.-Nr.: 30045

Prijs: € 49,90



recht

SafeMatrix Narrow

- Bandbreedte: 4,5 mm
- Inhoud: 50 St. (individueel verpakt)

Art.-Nr.: 30050

Prijs: € 49,90

Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten (voor bestellingen onder de 100,- €), geldig tot 30.06.2022. Fout en prijswijziging voorbehouden. De illustraties kunnen van kleur, enz. afwijken van het oorspronkelijke product. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

