



Donnez à vos patients plus de raisons de sourire

Opalescence

Tooth Whitening

Un sourire plus éclatant peut apporter à vos patients l'assurance pour sourire davantage. Et avec l'éclaircissement Opalescence Go, les patients peuvent éclaircir leurs dents quand ils le veulent et où ils le souhaitent. Voilà véritablement de quoi sourire.

Éclaircissement professionnel puissant prêt à l'emploi!



- Le matériau de la gouttière unique UltraFitTM offre un ajustement remarquablement confortable et s'adapte facilement au sourire de chaque patient
- Comme la gouttière recouvre l'arcade dentaire dans son intégralité, le gel est en contact avec plus de dents postérieures
- L'ajustement supérieur de la gouttière UltraFit garantit le contact d'une quantité maximale de gel avec les dents pendant l'éclaircissement
- Disponible avec du peroxyde d'hydrogène à 6 % (temps de port compris entre 60 et 90 minutes)

RÉFRIGÉRER

Opalescence Go Kits Patient



Parfum	6%
Menthe	4634
Pastèque	3592

Chaque kit contient 10 blisters avec
1 gouttière pour l'arcade supérieure et
1 pour l'arcade inférieure
1 dentifrice Opalescence de 20 ml (28 g)

RÉFRIGÉRER

Opalescence Go Kits Patient Boîte de 6



Parfum	6%
Menthe	4639
Pastèque	3593

10 gouttières pour arcade supérieure et 10 gouttières
pour arcade inférieure dans chaque kit
1 dentifrice Opalescence de 20 ml (28 g)

RÉFRIGÉRER

Opalescence Go Mini Kits



Parfum	6%
Menthe	4644
Pastèque	3599

Chaque kit contient 4 blisters avec
1 gouttière pour l'arcade supérieure et
1 pour l'arcade inférieure

RÉFRIGÉRER

Opalescence Go Mini Kits Boîte de 12



Parfum	6%
Menthe	4649
Pastèque	3600

4 gouttières pour arcade supérieure et 4 gouttières
pour arcade inférieure dans chaque kit

Procédure


Lire attentivement les instructions et les avertissements fournis avec les produits avant de les utiliser.



Sortir le produit de son emballage.
« U » – Gouttière d'éclaircissement pour arcade supérieure
« L » – Gouttière d'éclaircissement pour arcade inférieure



Placer la gouttière pour arcade supérieure sur les dents.

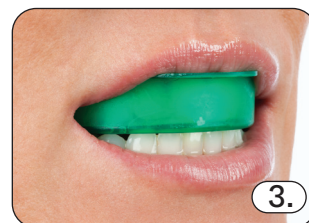

Mordre fermement, puis sucer la gouttière pendant 2 secondes.



Retirer la gouttière extérieure colorée et laisser la gouttière intérieure blanche sur les dents. Répéter la procédure avec la gouttière pour arcade inférieure.



Une fois écoulé le temps de port indiqué, retirer les gouttières d'éclaircissement et se brosser les dents.