

# SELEKT®

## Instructies voor het veilig gebruik van de SELEKT-doseerpomp



# INSTRUCTIES

We raden u aan om voor het eerste gebruik van de SELEKT-doseerpomp advies in te winnen bij uw dierenarts.

## Stap 1: Voorbereiding

Monteer de SELEKT-doseerpomp door de slang van de dosering aan de bovenkoppeling van de pomp vast te maken met de witte ring op zijn plaats op de slang.

Vul een SELEKT-emmer met 20 liter warm water en roer een zakje van de juiste formule. Als een koe 40 liter nodig heeft, bereid dan een tweede emmer van 20 liter voor of hergebruik de eerste. Trek de slang door het mondstuk zodat de blauwe punt tegen het einde van het mondstuk ligt (zoals weergegeven op de voorpagina). Open de neusklem.

## Stap 2: Plaats het mondstuk in de mond van de koe

Staande aan de rechterzijde van de koe beweegt u uw linkerhand over haar neus. Open haar mond en plaats het mondstuk (zoals weergegeven in deze afbeelding). Sluit de neusklem door deze vast te houden.

## Stap 3: Duw de slang naar beneden naar de slokdarm en in de pens

Draai het hoofd van de koe langzaam naar rechts en beweeg de slang langzaam door het mondstuk. Door langzaam te bewegen kan de koe de punt van de slang doorslikken. Blijf de slang doorgeven door het mondstuk tot 1-1,5 meter van de slang buiten de koe blijft. Probeer met de slang op het niveau van het kniestuk van de koe te komen (zie de afbeelding van de koe op de achterzijde van deze bijsluiting voor de plaatsing).



#### Stap 4: Vergrendel de slang in het mondstuk

Vergrendel de slang in het mondstuk door de blauwe hendel aan het uiteinde van het mondstuk te draaien.

#### Stap 5: Zorg ervoor dat de slang in de slokdarm zit

Palpeer de onderzijde van de nek van de koe aan haar linkerzijde. Als de slang zich in de slokdarm bevindt, zou u twee stevige kanalen moeten voelen: de luchtpijp en de slokdarm erboven, die alleen stevig zullen voelen als de slang erin zit. Als u niet zeker weet of u de twee kanalen kunt voelen, gebruik dan de pomp niet. Draai aan de blauwe hendel om de slang los te maken, trek hem terug door het mondstuk en begin weer met **stap 3**. Raadpleeg de afbeelding op de achterzijde van deze bijsluiters voor meer informatie.

#### Stap 6: Pompdosering

Zodra u de stevige slokdarm kunt voelen met de slang erin, kunt u beginnen met pompen. Gebruik constante, gelijkmatige bewegingen om de vloeistof in de pens te pompen.

#### Stap 7: Verwijderen van het mondstuk

Als alle vloeistof is gegeven, maakt u de blauwe hendel los en trekt u de achterkant van de slang door het mondstuk. Het is belangrijk dit te doen voordat u het mondstuk verwijdert, anders kan de koe op de slang kauwen. Laat de neusklem los en verwijder het mondstuk uit de mond van de koe.


#### Stap 8: Hygiëne

Was de apparatuur met warm zeepwater, niet warmer dan 50°C. We adviseren dan dat de pomp wordt gedesinfecteerd met hypochloorzuur, wat geen corrosief effect op de apparatuur heeft. Hypochloriet (bleekmiddel) kan als alternatief worden gebruikt maar kan een beetje corrosie veroorzaken. Zuiver hypochloriet mag niet worden gebruikt omdat het de apparatuur beschadigt.



## Afbeelding van de koe

De slang moet in de slokdarm worden ingebracht.

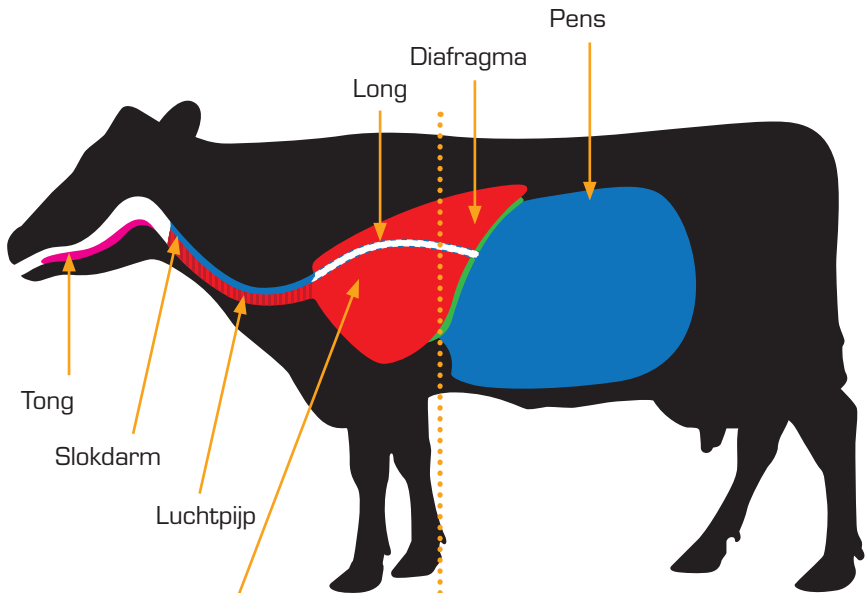

De slang moet in de slokdarm liggen en tussen de longen langs de blauwe stippellijnen en in de opening van de pens lopen.

Zoals uitgelegd in **stap 3** moet u proberen de slang in de ingang van de pens te brengen, ongeveer op dezelfde hoogte als de achterkant van de kniehoogte van de koe. Als deze zich in de juiste positie bevindt, blijft ongeveer 1 m tot 1,5 m van de slang buiten de mond van de koe. Begin dan met de pompdosering.

**Belangrijke opmerking** Als u vragen heeft over het gebruik van de SELEKT-doseerpomp neem dan contact op met uw dierenarts voor advies.



Ga langzaam en voorzichtig te werk zodat de koe de punt van de slang kan doorslikken. Forceer niet.



**Nimrod Nederland B.V.**  
Doetinchemseweg 59  
7007 CB Doetinchem  
Nederland

T +31 (0)314 848809  
E [nimrod@nimrodvet.eu](mailto:nimrod@nimrodvet.eu)  
[www.nimrodvet.eu](http://www.nimrodvet.eu)  
[www.selektsystem.co.uk](http://www.selektsystem.co.uk)

GMP+ FSA Assured

