

# SELEKT®


Onderhoud, reiniging & reserveonderdelen



ALLE  
ONDERDELEN  
VERVANGBAAR

# Reserve-onderdelen & accessoires voor de SELEKT® doseerpomp

---

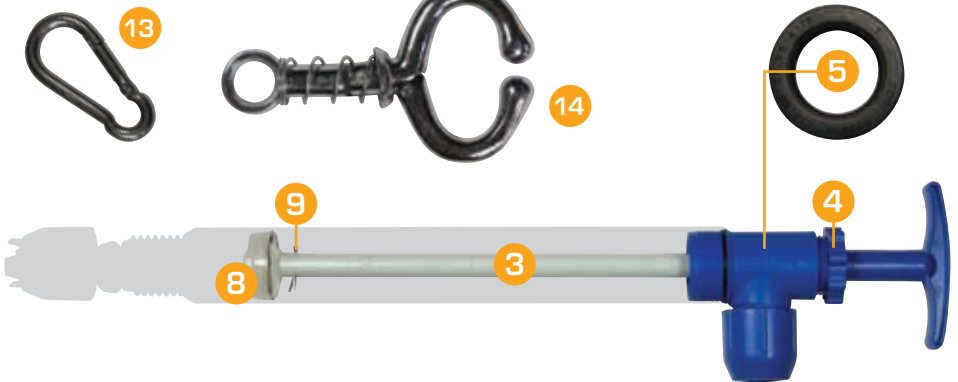

## Reserveonderdelen


---

- 1 Slang & uiteinde . . . . . SHT01
- 2 Mondstuk. . . . . 203035
- 3 Pompstanggreep & splitpen . . . . . 203041
- 4 Pompstangkoppeling . . . 203047
- 5 Pompstangring . . . . . 203055
- 6 Bovenstuk met pakking. . 203046
- 7 Onderstuk met pakking . . 203051
- 8 Met teflon beklede ring . 203048
- 9 Splitpen . . . . . 203049
- 10 Slangring 24 mm . . . . . 203011
- 11 Benedenkoppeling . . . . . 203052
- 12 Bovenkoppeling . . . . . 203053
- 13 Karabijnhaak. . . . . 203004
- 14 Neusklem. . . . . 203001

## Accessoires

---

- Emmer & deksel 22 liter . . . . . SBLO1
- Grote garde . . . . . SWKO1

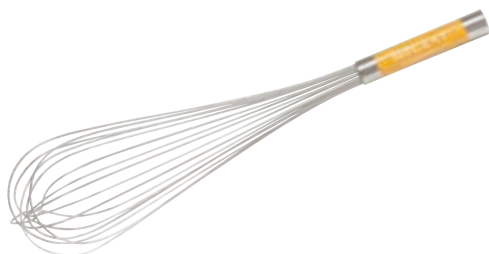

## Onderhouden van het mondstuk

---

Om het mondstuk in goede staat te houden, kunt u schuurpapier gebruiken om deze glad te maken als deze ruw wordt door de tanden van de koeien.

## De pomp reinigen

---

1. Was met zeep of een ander reinigingsmiddel om organisch materiaal te verwijderen.
2. Spoel met warm water.
3. Na het wassen raden wij aan de doseerpomp te desinfecteren met hypochloorzuur, wat geen corrosief effect op de apparatuur heeft.
4. Een alternatief is hypochloriet (bleekwater) maar dit kan een beetje corrosie veroorzaken.
5. Zuiver hypochloriet, dat natriumhydroxide bevat, mag niet worden gebruikt omdat het de apparatuur beschadigt.
6. Na het reinigen spoelt u de apparatuur opnieuw met warm water.

### Opmerking

Max watertemperatuur 50°C / 120°F

Het is be  
water be  
dit eenv  
garde ku  
deksel v

## Smering van de pompstangring

---



Schroef de pompstangkoppeling aan de bovenkant van de pomp los.



Spuit siliconen op de pompstangring en schroef de moer weer terug.

Belangrijk dat elk zakje minimaal 20 liter bevat. De emmer van 22 liter maakt het makkelijk om te doen. Met de extra grote opening kunt u de formule snel mengen en het voorkomt morsen.



# Vervangen van de pompstang, pompstangring of met teflon beklede ring

---



**Stap 1**  
Schroef het bovenste stuk los.



**Stap 2**  
Verwijder de pompstang met bovenstuk en met teflon beklede ring.



**Stap 3**  
Verwijder de splitpen van de pompstang en vervang de pompstang, pompstangring of met teflon beklede ring. Voor het vervangen van de pompstangring eerst de pompstangkoppeling losschroeven.



**Stap 4**  
Monteer de met teflon beklede ring en plaats een nieuwe splitpen.



**Stap 5**  
Monteer de pomp weer.  
Draai het bovenstuk niet te strak aan, dit kan leiden tot verzwakking.

# SELEKT<sup>®</sup>-materialen en drench-producten zijn verkrijgbaar bij uw dierenarts

Vraag uw dierenarts om meer informatie of neem  
contact op met Nimrod Nederland BV



**Nimrod Nederland B.V.**  
Doetinchemseweg 59  
7007 CB Doetinchem  
Nederland

T +31 (0)314 848809  
E [jansen.e@nimrodvet.eu](mailto:jansen.e@nimrodvet.eu)  
[www.nimrodvet.eu](http://www.nimrodvet.eu)  
[www.nimrodvet.co.uk](http://www.nimrodvet.co.uk)



GMP+ FSA Assured

SELEKT<sup>®</sup> is een geregistreerd handelsmerk van Nimrod Veterinary Products Ltd