



VERNIEUWD, NU MET  
OPSPORING VAN  
*Streptococcus uberis*

# UDDERCHECK

HIPRA  
DIAGNOS

HIPRA

# UDDER CHECK

## Een aanvullende test om te bevestigen dat mastitisvaccinatie past op uw bedrijf



### Waarom mastitiskiemen uitvoeren op uw bedrijf?

Door de dominante mastitiskiemen op uw melkveebedrijf op te sporen, bent u in staat om gericht preventieve maatregelen te nemen en te bevestigen of mastitisvaccinatie passend is.

Vaccinatie tegen verschillende typen bacteriën:

### Omgevingsgebonden

*Streptococcus uberis*

*E. coli*

Coliformen  
(*Klebsiella*, *Serratia*,  
*Enterobacter*)



### Koegebonden

*Staphylococcus aureus*



### Koe- en omgevingsgebonden

Coagulase-negatieve stafylokokken (CNS)



## Wanneer kan ik deze test gebruiken op melkmonsters?

Het uitvoeren van onderzoek naar bacteriën in een tankmelkmonster en in melkmonsters van besmette koeien gezamenlijk in één test, geeft een goed beeld van het bedrijf en de rol van de betrokken bacteriën waarop de vaccinatie gericht is.

### + Voordelen:

---

Nieuwe test met een verbeterde opsporing.

---

Werkt ook bij koeien die al met antibiotica behandeld zijn.

---

Easy sampling & transport by FTA Cards.

---



## Hoe neem ik de melkmonsters?



### Tankmelkmonster:

Meng de tankmelk vooraf om een goed gemengd melkmonster te kunnen nemen. Neem van bovenaf uit de tank het monster.



### Melkmonsters per koe:

**1**

#### SELECTEER 5-10 KOEIEEN MET:

**Zichtbare (klinische) mastitisgevallen en/of: Hoog celgetal (subklinische mastitis) dieren**

Stel vast welk kwartier aangetast is (CMT/T-pol test of geleidbaarheid).

**2**

#### HET NEMEN VAN EEN MELKMONSTER

Draag handschoenen  
Maak de speen schoon en ontsmet de speenpunt met alcohol  
Melk de eerste straal melk weg  
Melk 1 straal in een steriel melkbuisje

## Hoe UDDERCHECK te gebruiken?†

---

1. Neem contact op met uw dierenarts, zodat uw dierenarts de test kan bestellen bij HIPRA.
2. Neem de melkmonsters (5-10 dieren + 1 tankmelkmonster).
3. Breng de melkmonsters direct naar de dierenartsenpraktijk of bewaar de melkmonsters in de vriezer totdat voldoende monsters verzameld zijn.
4. De dierenarts zet de test in met behulp van uw melkmonsters en verzendt de test naar HIPRA in Spanje.
5. Na gemiddeld 14 dagen krijgt u de uitslag via uw dierenarts en kunt u bespreken of mastitisvaccinatie passend is.